



DRUCKER MODELL 614B

FESTWINKLIGE EINSTUFIGE ZENTRIFUGE

Mit der einfachen G-Kraft-Einstellung und dem einstellbaren mechanischen Timer bietet der 614B Laufzeitflexibilität und Festwinkelverarbeitung zu einem erschwinglichen Preis. Überall dort einsetzen, wo Proben vor Ort analysiert werden müssen.

Hoher Mehrwert

Jede Zentrifuge kommt einsatzbereit mit einem Festwinkelrotor, Rörchchenhaltern und einer 2-Jahres-Gewährleistung zum günstigen Preis.

Einfach zu verwenden

Alles richtig eingestellt. Sie müssen nicht mehr aus einer Vielzahl komplizierter Optionen auswählen. Der 614B bietet einfache G-Kraft-Einstellung von 1.100 xg und eine leicht einstellbare mechanische Skala mit Laufzeiten von 1 bis 30 Minuten.

Kühlbetrieb

Das einzigartige Design des Motorgehäuses und der Rotationskammer hält die Proben während der Bearbeitung kühl.


Zuverlässig gebaut

Genießen Sie jahrelangen wartungsfreien Betrieb mit den verstärkten Komponenten und dem Brushless-Motor des 614B.


Festwinkelrotor enthalten

Zum Drehen von 75 mm-, 100 mm- und 125 mm-Rörchchen in speziell entwickelten Rörchchenhaltern.

Ladewinkel

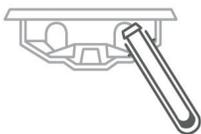

Drehwinkel

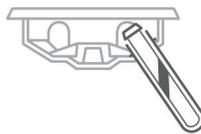

Festwinklige vs. horizontale Zentrifugation

Festwinklige Zentrifugen erzeugen Gelschichten, die beim Transport reißen können. Diese beschädigten Proben müssen erneut zentrifugiert werden - ein Prozess, den das CLSI aufgrund seiner bekannten negativen Auswirkungen auf die Analyseergebnisse nicht empfiehlt. Für eine bessere Gelschichtbildung, insbesondere für die Rörchchen, die transportiert werden, betrachten Sie bitte die Option horizontale Zentrifugation mit dem Modell 642E oder die HORIZON-Serie.


Rörchchen	Anwendungen	Zentrifugation	Enthalten	Gewährleistung
<p>6</p> <p>75-100, 125 mm</p> <p>0,5-15 ml</p>	<p>Biochemie</p> <p>Koag</p>	<p>Festwinkel</p> <p>1,100 xg Max. Relatives</p> <p>Fliehkraftfeld</p> <p>3,250 Max. U/min</p>	<p>Rotor, Eimerchen,</p> <p>Rörchchenhalter</p>	<p>2 Jahre</p> <p>Rotor: lebenslange</p> <p>Gewährleistung</p> <p>Erweiterte Gewährleistung</p> <p>verfügbar</p>

In den USA entwickelt und hergestellt. US-Support.

DRUCKER MODELL 614B

614B	Teilenummern
Zentrifuge	00-004-009-001
75-100 mm Röhrchenhalter	7713079 (1 St.)
125 mm Röhrchenhalter	7713032 (1 St.)
SmartView-Plattform	00-079-009-001
1 Jahr Gewährleistungverlängerung	03-0-0007-0001
2 Jahre Gewährleistungverlängerung	03-0-0007-0002
3 Jahre Gewährleistungverlängerung	03-0-0007-0006

614B	Spezifikationen
Schallpegel	55 dBA
Abmessungen	11,75 x 14 x 8,75 Zoll 30 x 35,5 x 22 cm
Gewicht	11 Pfund (5 kg)
Maximale Beschleunigung	30 Sekunden
Maximale Verzögerung	40 Sekunden
Leistung	115 V – 50/60 Hz

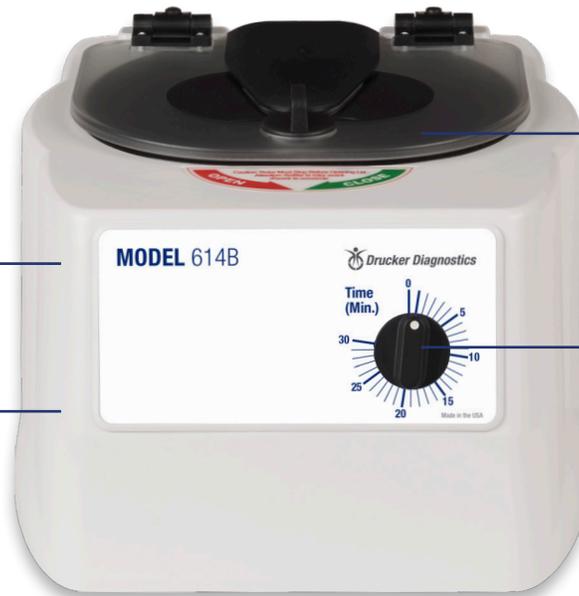

Verstärkte Schutzschale für maximale Sicherheit

Der Brushless-Motor garantiert ruhigen, wartungsfreien Betrieb

Beobachten Sie die Proben sicher durch den durchsichtigen, bruchsicheren Deckel

Der leicht einstellbare mechanische Timer kann in einer Zeit zwischen 1 und 30 Minuten eingestellt werden

ANDERE DRUCKER-MODELLE



642E

Weltweit führende klinische Labor-Zentrifuge Für Blut



HORIZON 6 FA

3 Zyklen, 6-Rohr-Kapazität Für Blut und Urin



HORIZON 6 Flex FA

Digitalanzeige, 10 Zyklen, 6-Rohr-Kapazität Für Blut und Urin

FDA GELISTET



**RoHS
Compliant**



**ISO13485
certified**



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

