

DRUCKER MODELLO 642M CENTRIFUGA DC MOBILE A 12V

La 642M facilita percorsi efficienti e un raggio più lungo per flebotomisti mobili consentendo la centrifugazione nel veicolo. Centrifugate i campioni entro due ore dall'estrazione e percorrete la strada più comoda senza dover tornare al laboratorio centrale. Alimentata direttamente dalla corrente elettrica a 12V di un veicolo, la 642M offre la centrifugazione orizzontale per una separazione di alta qualità del gel in provetta e il funzionamento a due pulsanti per la massima riproducibilità.

Semplice da usare

La semplice interfaccia esegue il ciclo preimpostato (10 minuti a 3.400 giri/min a 1.600 xg) con la semplice pressione di un pulsante. Il tempo di esecuzione può essere impostato tra 1 e 30 minuti.

Progettato per centrifugazione mobile

Con la centrifugazione all'interno del veicolo, i flebotomisti sono liberi di pianificare un percorso di una giornata senza tornare al laboratorio. Questo dispositivo dal prezzo abbordabile può aumentare notevolmente la gamma di servizi e la produttività senza sacrificare la qualità dei campioni o l'esito del paziente.

Realizzato per durare

Nessuna manutenzione di routine. Il motore brushless e l'esclusivo sistema di raffreddamento basato sulla convezione garantiscono anni di separazioni di alta qualità.

Progettato per la sicurezza

Garantite la massima sicurezza con un coperchio trasparente infrangibile che si blocca fino a quando la centrifuga non è completamente ferma.

Un affare


Ogni unità è pronta all'uso con rotore orizzontale, portaprovette universale e garanzia di 2 anni inclusa nel conveniente prezzo.




Rotore orizzontale a 2 stadi

Il nostro design del rotore orizzontale oscillante brevettato incorpora un esclusivo portaprovette che produce campioni orizzontalmente separati, ideale per il trasporto.

Angolo di carico

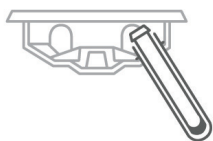

Angolo di rotazione

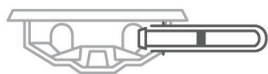


Provette	Applicazioni	Centrifugazione	Inclusi	Garanzia
6 75-100 mm (3-10 mL)	Biochimica, Coagulazione, PPP	Orizzontale 1.600 xg RCF Max Max 3.400 giri/min	Rotore Portaprovette	2 anni Rotore: garantito a vita Estensione di garanzia disponibile

Progettato, costruito e con servizio al cliente negli Stati Uniti

DRUCKER MODELLO 642M

642M	Numeri di parte
Centrifuga	00-077-009-000
Portaprovette da 75-100 mm	7713079 (qtà: 1)
Piattaforma SmartView	00-079-009-001
Estensione garanzia di 1 anno	03-0-0007-0001
Estensione garanzia di 2 anni	03-0-0007-0002
Estensione garanzia di 3 anni	03-0-0007-0006

642M	Specifiche
Livello audio	65 dBA
Dimensioni	11,75 x 14 x 8,75 in 30 x 35,5 x 22 cm
Peso	12 lb (5,4 kg)
Accelerazione massima	10 secondi
Decelerazione massima	20 secondi
Potenza	12V

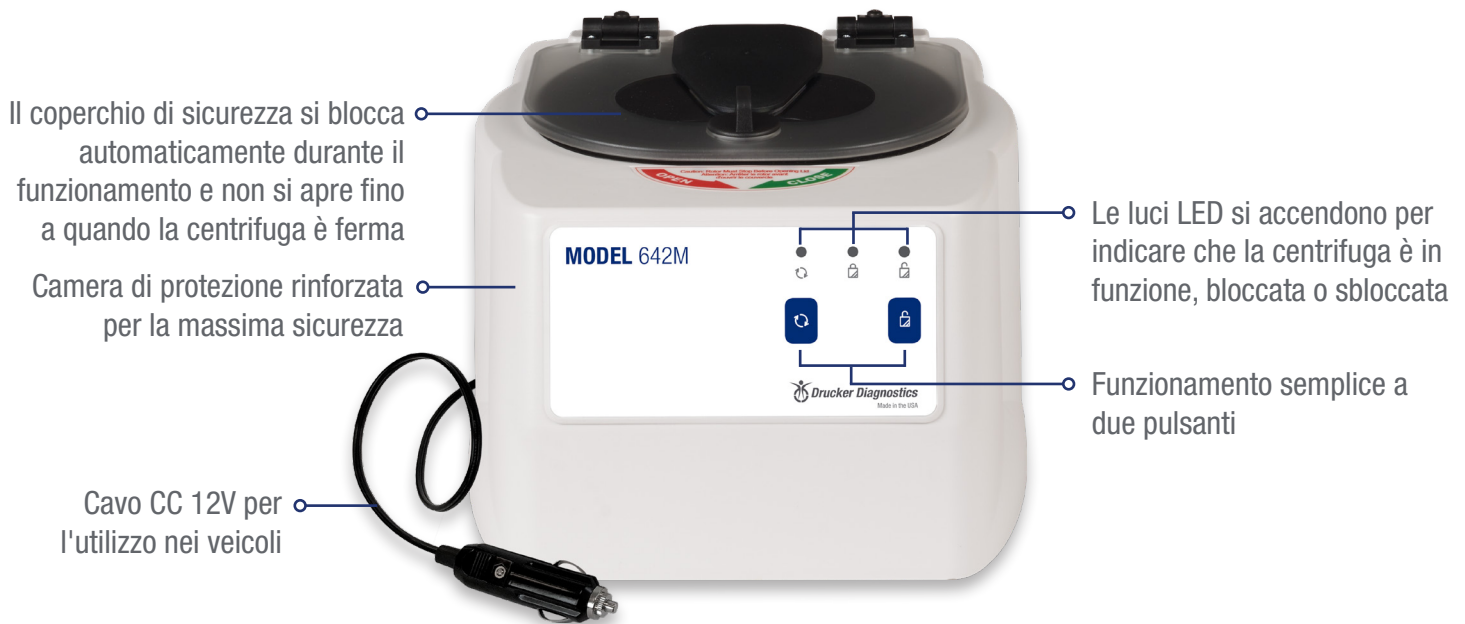

Il coperchio di sicurezza si blocca automaticamente durante il funzionamento e non si apre fino a quando la centrifuga è ferma

Camera di protezione rinforzata per la massima sicurezza

Cavo CC 12V per l'utilizzo nei veicoli

Le luci LED si accendono per indicare che la centrifuga è in funzione, bloccata o sbloccata

Funzionamento semplice a due pulsanti

Protegete ulteriormente i campioni sulla strada con i contenitori di sicurezza Drucker SampleSafe™



Contenitore di sicurezza a carico dall'alto

Contenitore di sicurezza a carico frontale

Le temperature estreme possono rendere inutilizzabili i campioni in soli 15 minuti, il che pone un problema unico per i flebotomisti mobili. Il Drucker SampleSafe™ offre la soluzione. Anche se conservato in veicoli caldi o freddi, SampleSafe conserva l'integrità del campione fino a 24 ore e consente di raggiungere ancora più pazienti.

Contenitore di sicurezza SampleSafe™ a carico dall'alto:

P/N 00-071-009-000

Contenitore di sicurezza SampleSafe™ a carico frontale:

P/N 00-078-009-000

**ELENCATI
DAL FDA**

**RoHS
Compliant**



**ISO13485
certified**



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

