

HORIZON

DRUCKER HORIZON 6, 12 E 24 CENTRÍFUGAS DE ROTINA COM SET & LOCK

Minimize erro, reduza tempo de treinamento e forneça o melhor resultado para o paciente com a HORIZON. Defina e bloqueie seus ciclos validados para evitar alterações acidentais. Reduza ainda mais os possíveis erros com a opção de bloquear um único ciclo.

Fácil de Usar

Use a interface simples de dois botões para selecionar uma predefinição ou programar e registrar suas configurações validadas na etiqueta inclusa. Processe tubos de 75-125 mm (0,5-50 ml) no mesmo suporte sem almofadas.

Fácil de Monitorar

Processe amostras com mais eficiência com a iluminação LED da tampa do HORIZON: desligada, quando a centrífuga está pronta para carregar; ligada, quando está em funcionamento; e piscando, no final do ciclo.

Feita para Durar

Nenhuma manutenção de rotina com um motor sem escova, componentes compósitos de engenharia.

Projetada para Segurança

Proteja seu laboratório com detecção de desequilíbrios e uma tampa inquebrável que só pode ser aberta quando o rotor estiver parado, mesmo que a unidade perca potência

Um Grande Valor

Qualidade imbatível para qualquer orçamento. Todas centrífugas da Drucker estão completas para operar com rotor horizontal, porta-tubos universais e garantia de 2 anos, tudo isso a um preço acessível.



Capacidade dos Tubos	6, 12 ou 24 (75-125 mm/0,5-50 ml)
Aplicações	Bioquímica, Coagulação, PPP, PRP, Urina
Centrifugação	Horizontal (máx. 2.000 xg/3.800 RPM)
Incluindo	Rotor, Caçambas, Porta-tubos e Rótulo de Ciclo
Garantia *	2 anos (rotor: garantia vitalícia)

* *Garantia estendida disponível*



HORIZON 6




HORIZON 12



HORIZON 24

Projetado, fabricado e com manutenção nos EUA

HORIZON 6, 12 E 24

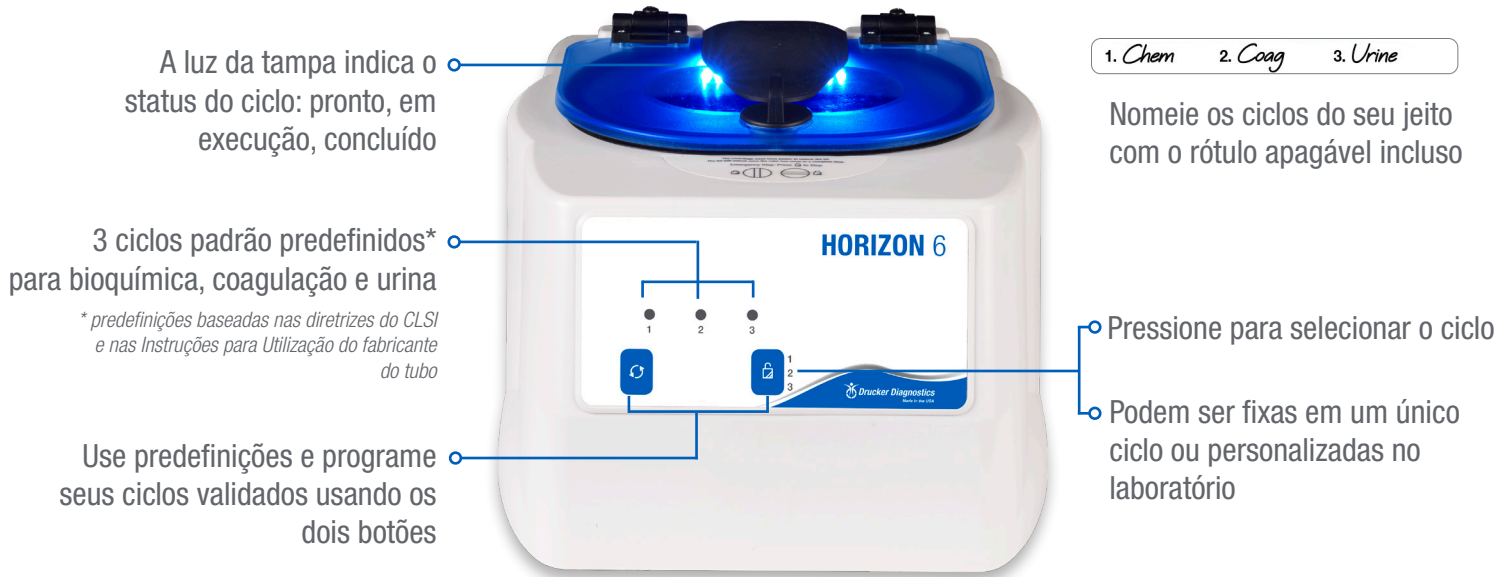

A luz da tampa indica o status do ciclo: pronto, em execução, concluído

3 ciclos padrão predefinidos* para bioquímica, coagulação e urina

*predefinições baseadas nas diretrizes do CLSI e nas Instruções para Utilização do fabricante do tubo

Use predefinições e programe seus ciclos validados usando os dois botões

1. Chem 2. Coag 3. Urine

Nomeie os ciclos do seu jeito com o rótulo apagável incluso

Pressione para selecionar o ciclo

Podem ser fixas em um único ciclo ou personalizadas no laboratório

Números das Peças	HORIZON 6	HORIZON 12	HORIZON 24
Centrífuga	00-276-009-000	00-283-009-000	00-284-009-000
Porta-tubos/caçamba de substituição de 75-100 mm	7713079 (1 qtd)	7713079 (1 qtd)	7713023 (1 qtd)
Porta-tubos de 50 mm			7713037
Tapa			7713035
Plataforma SmartView	00-079-009-001		
Extensão de Garantia de 1 ano	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001	03-0-0007-0001
Extensão de Garantia de 2 anos	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002	03-0-0007-0002
Extensão de Garantia de 3 anos	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006	03-0-0007-0006
* Configurações Personalizadas	00-100-100-101	00-100-100-101	00-100-100-101

* Adicione este número de peça no seu pedido para ter seus ciclos personalizados validados pré-programados na fábrica

Ciclos Padrão Predefinidos		HORIZON 6	HORIZON 12	HORIZON 24
1 (Bioquímica)	10 min em 1.800 xg	3.600 RPM	3.500 RPM	3.300 RPM
2 (Coagulação, PPP)	15 min em 1.500 xg	3.300 RPM	3.200 RPM	3.000 RPM
3 (PRP, Urina)	5 min em 500 xg	1.900 RPM	1.800 RPM	1.700 RPM

Especificações	HORIZON 6	HORIZON 12	HORIZON 24
Nível de ruído	64 dBA	56 dBA	59 dBA
Dimensões (L x P x A)	12 x 14 x 9 pol. 30 x 36 x 23 cm	13 x 15 x 9 pol. 33 x 38 x 23 cm	15 x 17 x 9 pol. 38 x 43 x 23 cm
Peso	12 lbs (5,4 kg)	30 lbs (13,7 kg)	39 lbs (17 kg)
Potência	95 a 253 V – 50/60 Hz		

LISTADA PELA FDA



RoHS Compliant



ISO13485 certified



druckerdiagnostics.com
sales@druckerdiagnostics.com

+1-814-692-7661

